



## CB 27 Adhesive remover



### CB 27 – the special tungsten carbide instrument for quick and safe removal of adhesive residues

After completion of an orthodontic treatment with brackets, with this instrument you can remove adhesive residues quickly and without damaging sound tooth substance. This is possible due to the instruments' twisted blades made of durable special

tungsten carbide, thus assuring smooth operation and high treatment comfort.

Non-cutting blades on the instrument tip minimize the risk of damaging the gingiva.

### Recommendations for use:

- To be used in the contra-angle at an optimal speed of 40 000 min<sup>-1</sup>
- Apply low contact pressure and sufficient spray coolant
- In order not to obstruct vision, strong airstream can be used instead of water coolant
- After complete removal of the adhesive residues the enamel will show a natural glance



CB 27



REF	CB 27
ISO	500.204.194.XXX... 016



### Эксклюзивный дистрибьютор в России


129010 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1.

Тел./факс: (495) 627 0563, 208 7743, 632 9691

E-mail: kolechko@orc.ru

www.kolechko.ru



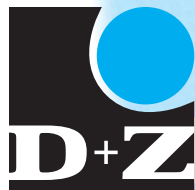

## CB 27 Klebstoffentferner



### CB 27 – das Spezialhartmetallinstrument für das zügige und zahnschonende Entfernen von Kleberresten.

Mit dem hier vorgestellten Instrument entfernen Sie nach Abschluss einer kieferorthopädischen Behandlung verbleibende Klebstoffreste schnell und ohne Beeinträchtigung der gesunden Zahnschmelz. Ermöglicht wird das durch die gewundenen Schneiden aus langlebigem Spezial-

hartmetall, die für sanfte Laufruhe des Instruments sorgen und einen hohen Behandlungskomfort bieten.

Stumpfe Schneiden im Kopfteil des Instruments minimieren ein Verletzungsrisiko der Gingiva.

#### Anwendungsempfehlung:

- Einsatz im Winkelstück bei einer optimalen Drehzahl von 40 000 min<sup>-1</sup>
- Instrument mit geringer Anpresskraft und üblicher Spraykühlung anwenden
- Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse kann unter kräftigem Luftstrom auch ohne Spraykühlung gearbeitet werden
- Nach vollständigem Entfernen der Kleberreste erscheint der Zahnschmelz in natürlichem Glanz



CB 27

REF	CB 27
ISO	500.204.194.XXX... 016



#### Эксклюзивный дистрибьютор в России

129010 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1.

Тел./факс: (495) 627 0563, 208 7743, 632 9691

E-mail: kolechko@orc.ru

www.kolechko.ru

