




SCHWERT
SWORD - ESPAÑA
EPEE - SUISSE

SCHWERT - SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN


MADE IN GERMANY

ARNHOLD FASS- & BOHRZANGE NEU !!!

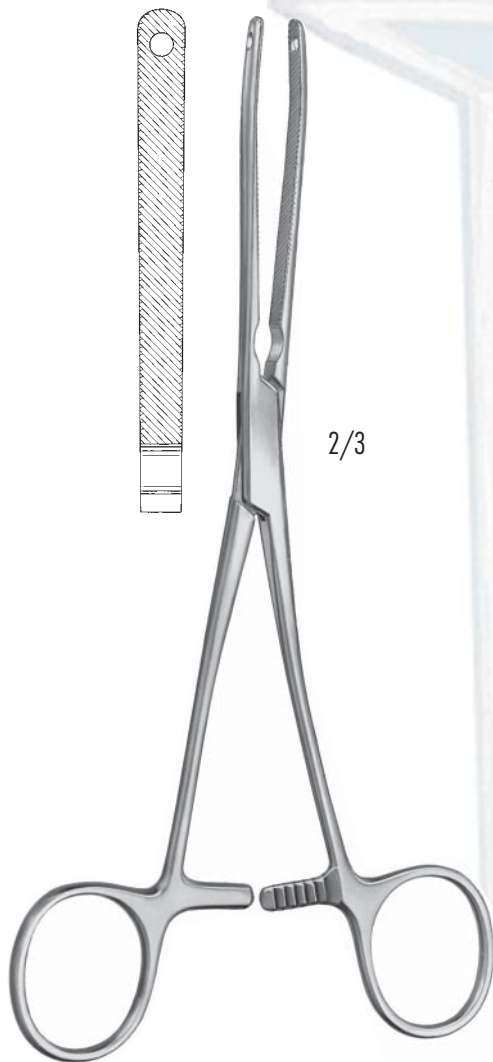


1230-20 ARNHOLD

20 cm

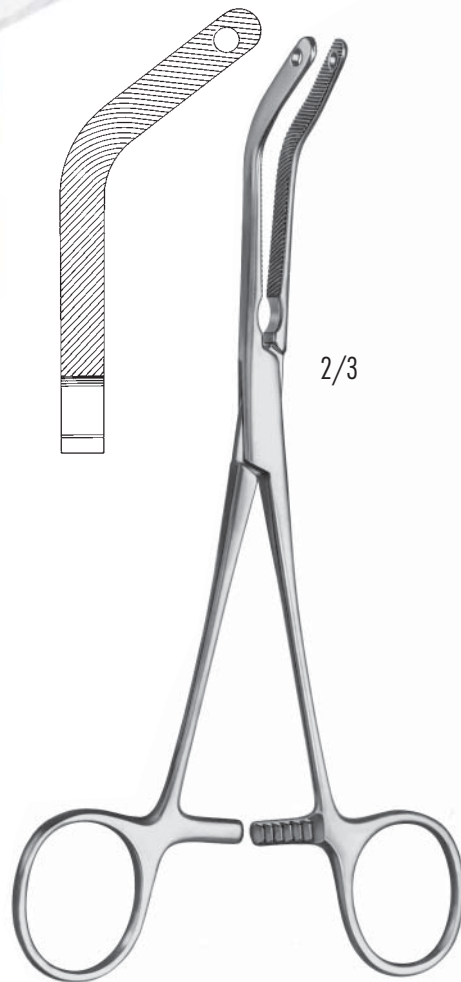

1230-21 ARNHOLD

gewinkelt, 20 cm

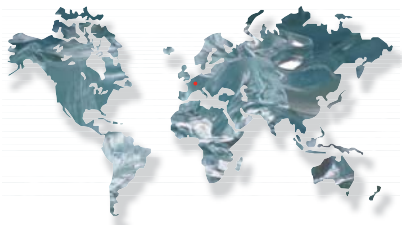

A. SCHWEICKHARDT GMBH & CO. KG

Bahnhofstr. 80 - 78532 Tuttlingen - Germany

P.O. Box 69 - 78501 Tuttlingen - Germany

Phone +49 7461-9297-0 - Fax: +49 7461-9297-19

www.schwert.com - e-mail: contact@schwert.com



FUNKTIONSWEISE DER ARNHOLDZANGE

Wenn ein Implantat nicht gesetzt werden kann, da der Durchschnitt des Kiefers nicht ausreicht, muss ein Knochenstück implantiert werden. Der zusätzliche Knochen wird z. B. aus dem Unterkiefer gewonnen.



Das Knochenstück wird dann mit der geraden Zange (Frontzahnbereich) oder mit der gebogenen Zange (hinterer Zahnbereich) an die zu verstärkende Stelle arretiert.

Zum Festigen wird hierzu eine Titanschraube genommen. Die Pilotbohrung sowie die Fixierung der Schraube kann direkt durch das Loch am Ende des Instruments eingefügt werden.

Nach 6 Monaten kann man das Implantat setzen, da der Knochenaufbau stabil und beendet ist.

